

Návod na použitie

Kozmetické zariadenie diamantová dermabrazia AM60



Vážený zákazník

Ďakujeme Vám, za zakúpenie našich produktov. Pre zabezpečenie maximálneho výkonu prístroja a bezpečnej práce s ním si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie. Návod si prosím uschovajte.

BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY:

1. Stroj je profesionálne zariadenie pre použitie v kozmetických salónoch .
Používať ho môže kvalifikovaný personál , aby sa zabránilo nežiadúcim účinkom počas liečby .
2. Nerozoberajte prístroj a nepokúšajte sa používať na iné účely , než je uvedené v tejto príručke. Servis a opravy musí vykonať servis v spoločnosti ACTIV .

3. Neinštalujte alebo neprevádzkujte prístroj v blízkosti vlhkých zariadení alebo mokrými rukami tak, aby žiadna tekutina nevošla do prístroja.
4. Prosím, odpojte ho od napájania a obráťte sa na servisné stredisko na ACTIV v nasledujúcich prípadoch :
 - kvapalina sa dostala dovnútra prístroja ,
 - Prístroj vydáva zvláštny zápach, dym alebo podivné zvuky ,
 - napájací kábel je poškodený ,
 - zariadenie vám spadlo alebo má poškodený kryt .
5. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky po použití prístroja .
6. Nevkladajte nič do otvoru v zariadení. Ak cudzí predmet spadne do diery , vyberte kábel zo zásuvky a obráťte sa na predajcu alebo výrobcu .
7. Neumiestňujte prístroj na nestabilný vozík , stojan alebo vozidla .
8. Napájanie musí byť v súlade s údajmi na typovom štítku. Inak je tu riziko nesprávnej činnosti.

Poznámka:

V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných udalostí, obráťte sa na služby v ACTIV - vyhnite sa tak nebezpečenstvu.

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti ani vedomosti, pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie o použití tohto zariadenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré môžu byť využité alebo recyklované .

PODMIENKY REKLAMÁCIE

Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Pred vrátením prístroja do servisu kontaktujte servisné miesto kde predložíte platný záručný list.

Záručný list musí byť vyplnený presne má obsahovať pečiatku a podpis predajného miesta,

Záruka je neplatná, v prípade akýchkoľvek zmien na výrobku .

Predný panel



Ukazovateľ času

1. Regulácia intenzity mokrodermabrazie
2. Vákuometer
3. Pripojenie hadičky dermabrazie

Pripojenie jednorazového filtra dermabrazie

Jednorazový bavlnený filter



DIAMANTOVÁ DERMABRAZIA

Diamantová mikrodermabrázia je bezbolestná metóda ošetrovania pokožky špeciálnou diamantovou koncovkou pod vysokým tlakom. Po jemnom odstránení povrchových buniek pokožky dochádza k zvýšenej tvorbe nových buniek.

Táto metóda si našla široké využitie v omladzovaní pokožky, korekcii vrások a jaziev, odstraňovaní škvŕn, čistení pokožky a eliminácii akné. Efekt po ošetrení mikrodermabráziou je viditeľný už po prvom zákroku. Pokožka sa stáva vyhladená, vypnutá, dostáva zdravú farbu.

Výhody diamantovej dermabrázie

- Bezpečne regulované odstraňovanie odumretých kožných buniek
- Alternatívna náhrada chemického pílingu
- Rýchlejšie vstrebávanie aplikovaných kozmetických prípravkov do pokožky
- Stimulácia produkcie kolagénu a elastínu
- Posilnenie obranyschopnosti kože

Indikácia:

1. Jazvy,
2. Čierne bodky milie,
3. Zväčšené póry,
4. Drsná šupinatá pokožka,
5. Omladenie pleti a odstránenie jemných vrások okolo očí, úst a krku,
6. Strie,
7. Suchá koža,
8. Farebné a starecké škvŕny
9. Solárne škvŕny poškodenej pokožky (tvár, ruky, krk),
10. Akné vulgaris (punctata, folikulárna)

Kontraindikácia:

1. Vírusové infekcie,
2. Bakteriálne infekcie
3. Plesňové infekcie,
4. Pustulárne akné,
5. Akné hnisavé,

6. Koža očných viečok,
7. Viditeľné poškodenie kože,
8. Rakovina kože,
9. Hemangióm,
10. Dlhodobé liečené akné (aspoň 3 mesiace)
11. Keloidné (jazvy)
12. Chirurgické výkony na tvári (do 2 mesiacov po zákroku).

Nevykonáva sa:

Pri menštruácii

Po opalovaní

V tehotenstve a po chirurgických zákrokoch na tvári

Frekvencia procedúr:

Séria 5-10 procedúr

Akné terapia interval medzi procedúrami je 3 týždne

Vyhľadzovanie vrások interval medzi procedúrami 10-15 dní

Príznaky po procedúrach:

Začervenanie pokožky 24-48 hodín po procedúre

Svrbenie mravenčenie pokožky

Citlivosť pokožky

Starostlivosť o pokožku po procedúre:

Neopalovať sa a nevystavovať priamemu slnečnému žiareniu

Do 72 hodín nenavštevovať bazény a plavárne s chlórovou vodou

Používať krém s vysokým UV faktorom minimálne faktor 30

Krok po kroku:

- Zapnite prístroj hlavným vypínačom 0/I (3),
- Regulačným gombíkom nastavte požadovanú sáciu silu, ktorú si kontrolujete na vákuometri.
- Začnite vykonávať aplikáciu

Príprava pokožky na procedúru :

1. Na odlíčenie použijeme:

- **Mlieko SYIS** . Prípravok obsahuje olej z hroznových jadier s upokojujúcimi účinkami.

Mlieko obsahuje močovinu, ktorá má silné zvláčňujúce účinky, poskytuje lepšiu absorpciu látky do kože,

- **Levandulový med pre čistenie SYIS** . Prípravok obsahuje hroznový olej a vitamín E rozpustný v tukoch. Tieto látky zastavujú proces starnutia pokožky, pôsobia protizápalovo a upokojujúco,

2. Vykonáme peeling:

- **Enzimatický píling SYIS** ktorým vykonáme masáž . Enzým bromelain napomáha štiepeniu bielkovín, získava sa z ananásu, obsahuje vitamín C, ktorý má kľúčovú úlohu pri odstraňovaní škvŕn.
- **Peeling korund s guličkami jojoby a koloidným zlatom SYIS** ,posilňuje a vyhladzuje vrstvy kože. Výrobok obsahuje zmes ovocných extraktov: maliny , jahody , kivi , jablká , broskyne , papája s hydratačnými vlastnosťami. **Koloidné zlato** znižuje tvorbu vrások, urýchľuje prechod účinných zložiek do pokožky. **Korund** má vlastnosti zbrusovacie, stimuluje prirodzenú obnovu nových tkanív a kolagénu - bio syntéza. Zelené jojobové korálky pomáhajú odstrániť odumreté bunky .

3. Opláchnite zvyšky peelingu jednorázovými utierkami.

4. Pre tónovanie , použite :

- **Antibakteriálne Lotion SYIS**, obnovuje prirodzené pH pokožky. Tonik obsahuje kyselinu mliečnu s exfoliačným a antibakteriálnym pôsobením.
- **Minerálna voda tonizujúca SYIS**. Výrobok obsahuje **Multiminerálny Complex II**, ktorý urýchľuje látkovú výmenu pokožky, takže koža je posilnená, pružná a mäkká.

5. Po očistení pokožky túto poriadne osušte a aplikáciu vykonávajte 20-25 min. podľa nasledujúceho obrázku.

- **Ampulka Collagen Pure 100%** Kolagénové ampulky obsahujú rozpustený kolagén zadržávajúci vodu v pokožke.
- **Ampulky SYIS na pokožku s rozšírenými cievami**. Obsahujú výťažok z japonského plodu perelkovca. Ricínový olej zvlhčuje suchú pokožku a retinol obsiahnutý v ampulke a vitamín E zabraňuje tvorbe voľných radikálov. S cynamenovým olejom má ampulka antibakteriálny účinok .

- **Hydratačné a vyživujúce ampulky** Obsahuje hydrolyzovaný mliečny proteín , ako je prírodný NMF (prírodný faktor hydratačný) . Ampulky pôsobia liftingujúco.
 - **Ampulky posilňujúco zmiernujúce pre cievky** sú ideálne pre pleť s rozšírenými cievkami a sklonom k podráždeniu. Výrobok obsahuje, okrem iného výťažok zo Soforyjaponskej bohatý na rutín posilňujúcu krvné cievy. Ampulky posilňuje a chráni pleť s rozšírenými cievkami a suchu, obnovuje poškodený hydrolipidný plášť kože a reguluje transepidermálnu stratu vody (TEWL).
 - **Bieliacia ampulka s vit. C** výrobok obsahuje aktívny derivát vitamínu C, ktoré inhibuje tvorbu škvŕn a zosvetľuje už existujúce.
 - **Ampulky liftingujúce TripeptidViperSerum s jedom zmiije** Liftujúce ampulky obsahujúce 4% roztoku syntetickej substancie boli vytvorené na základe bielkovín v jede zmiije. SYN ® - AKE pôsobí proti vráskam uvoľnením svalstva a fibroblastov.
6. Na pokožku aplikujeme **Alginátovú masku na kožu SYIS** v kombinácii s **Aktivátorom masky SYIS** .

Dostupné typy masiek alginátových SYIS :

- Alginátová maska BotoksováHibiscusPeelOff 30g ,
 - Alginátová maska 300ml exotic ,
 - Alginátová maska 300ml kaviár ,
 - Alginátová maska upokojujúca - Relaxačná 300 ml ,
 - Alginátová liftingujúca maska 300 ml ,
 - Alginátová maska 300ml Mocca ,
 - Alginátová maska 300ml New Look ,
 - Alginátová čistiaca 300 ml ,
 - Alginátová maska Čistiaci peeling z morského bahna Off 30g ,
 - Alginátová maska 300 ml anti - akné ,
 - Alginátová maska s kaviárom (PeelOff) 30 g
 - Alginátová rozjasňujúca maska s výťažkami z Mulberry 30 g ,
 - Transparentné zlato maska (PeelOff) 50 g
 - Alginátová maska 300ml Vitamín bomba ,
 - Alginátová Maska s arganového oleja (PeelOffShaker) 25 g
 - Hydratačná maska - regenerujúca 250ml
 - Maska sťahujúca - zmatňujúca 250 ml
7. Aplikujeme **SYIS očný krém**. Kombinácia kyseliny mliečnej a oxidu zinočnatého poskytuje rýchly spevňujúci účinok. Vďaka prítomnosti oxidu zinočnatého krém dokonale odstraňuje známky únavy, opuchy a kruhy okolo očí , zlepšuje mikrocirkuláciu .
8. Na konci aplikácie použijeme
- **Krém pre pokožku s rozšírenými cievkami**. Obsahuje vitamín E , mandľový olej pre hydratáciu, panthenol s ukludňujúcimi vlastnosťami.

- **Tripeptidvipercream 30ml s jedom zmije** Denný a nočný krém proti vráskam obsahuje syntetické proteíny, ktoré prirodzene vyskytujú v jede zmije druhu *Tropidolaemuswagleri*. Tento proteín paralyzuje vzruch z nervových buniek na svalové bunky a fibroblasty, tým, že zníži kontraktilitu buniek. To zase spôsobuje skrátenie existujúcich vrások a zabraňuje vzniku nových, pretože sa znižuje schopnosť hnetenia kože do podoby vrások. Okrem toho, krém obsahuje kyselinu hyalúronovú, ktorá udržiava primeranú úroveň hydratácie pokožky!!
- **HelixExtract krém s výťažkom zo slimákov 30 ml** Denný a nočný krém o pôsobení:- Výživnom - Hydratačnom - Proti vráskam
 - Regeneračnom - Ochrannom - Stimulujúcim fibroblasty k produkcii kolagénu

Krémy pre ľudí v každom veku, ktorí majú problémy, ako:

 - Jazvy po akné - Vrásky - Strie - Nadmerná produkcia mazu
 - Microcomedones

9. Na úplný záber použije **Kamuflážny krém SYIS**.

Pohyb hlavicou:



DEZINFEKCIA:

Hlavice sa čistia v ultrazvukovej čističke od mechanických nečistôt. V prípade, že sa táto nepoužíva časom sa môže stať, že sa povrch hlavice stane hladkým. Je to tým, že sa v diamantovom zrne usadia biologické častice, ktoré je nutné odstrániť pomocou ultrazvukovej čističky. Na dezinfekciu prosím výlučne používajte dezinfekčný roztok ANIOSYME DD1. V prípade ak by ste používali iný prípravok môže dôjsť ku korózii hlavíc, čo nemôžeme považovať za opodstatnenú reklamáciu. Hlavice je možné sterilizovať v sterilizátore či už UV alebo teplovzdušnom.

Pred prvým spustením!

Pred prvým spustením zapnite dermabraziu na 15 minút na prázdno. Po 15 minútach ju vypnite a potom môžete bez problémov vykonávať aplikácie dermabrazie.

Technické údaje:

Napájanie: 220V

Frekvencia: 50Hz

Výkon: 110 W

Výkon sacej sily: 65cmHg

Poistka 3A

Problém	Riešenie
Prístroje je pripojený k sieti ale nereaguje	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je hlavný prívod správne pripojený k sieti2. Skontrolujte, či je tlačidlo zapnutia kazety v pozícii zapnutej - zatlačenej
Slabé sanie alebo žiadne sanie	<ol style="list-style-type: none">1. Skontrolujte, či je hlavný prívod správne pripojený k sieti2. Skontrolujte či nie je znečistený filter

Počas práce sa hlavná jednotka prehrieva	<ol style="list-style-type: none">1. Ak sa zariadenie používa príliš dlho, tak ho vypnite z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť2. Skontrolujte, či máte správne napätie v sieti (toto je práca odborne vyškoleného elektrikára)
Nieje v zariadení žiaden elektrický prúd	Skontrolujte či nie je poškodená poistka ak áno vymeňte ju