

DERMO LIFT & PEEL

KOZMETICKÝ PRÍSTROJ NA ČISTENIE A LIFTING TVÁRE

P R O F E S S I O N A L



ČISATENIE - KAVITAČNÝ PEELING

- Odstraňuje mŕtve kožné bunky
- Redukuje vrásky
- Lieči a bráni tvorbe akné
- Redukuje jazvy
- Čistí pokožku
- Uzatvára póry
- Reguluje tvorbu mazu

LIFTING A VÝŽIVA POKOŽKY - SONOFORÉZA

- Lifting pokožky
- Redukuje vrásky
- Zlepšuje tvorbu kolagénu
- stimuluje bunky k prírodnej obnove
- Transport aktívnych látok - ampulky do pokožky

Vážený zákazník

Ďakujeme Vám, za zakúpenie našich produktov. Pre zabezpečenie maximálneho výkonu prístroja a bezpečnej práce s ním si prosím dôkladne prečítajte tento návod na použitie. Návod si prosím uschovajte.

Kavitačný peeling

je predovšetkým bezbolestné čistenie pokožky pomocou ultrazvukových vln. Ide o dôkladné čistenie pokožky a odstránenie nadbytočného mazu ale aj ošetrovanie a odstraňovanie akné. Počas pílingu ak dôjde ku kontaktu ultrazvukových vln s tekutinou dochádza ku kavitácii, čo znamená, že dochádza ku chemickej reakcii kedy sa vytvárajú mikroskopické plynové bublinky ktoré majú za následok odstránenie odumretých kožných buniek.

Indikácia:

1. Zlepšenie kontúr tváre a podbradku
2. Spevnenie štruktúry pleti
3. Viditeľné povrchové vrásky
4. Zmenšenie vačkov pod očami
5. Obnovenie tvorby kolagénu
6. Prevencia proti starnutiu pokožky
7. Hĺbkové čistenie pórov

Kontraindikácia:

1. Tehotenstvo
2. Viditeľné poškodenie pokožky - rany
3. Ochorenia hubové, vírusové, bakteriálne
4. Ochorenia nervového ústrojenstva
5. Psychické choroby - ťažkosti
6. Epilepsia
7. Onkologické ochorenia (v súčasnosti pripadne po liečbe)
8. Infekčné ochorenia
9. Ak sa v pokožke alebo v tele nachádzajú kovové predmety - implantáty, ale aj napríklad silikónové implantáty v prsníkoch
10. Ak má rôzne zdravotné alebo elektrické prístroje, sluchový strojček, kardiostimulátor, transplantované orgány
11. Deti mladšie 12 rokov veku života
12. Ak má na tele kovové predmety ako sú napríklad náušnice - piersing

13. Vysoký tlak

14. Cukrovka

15. Choroby srdca

Metodika aplikácie:

Na tvári zvlhčenej tonikom vykonávame kavitačný peeling, doba procedúry 10-15 minút. Špachtľu držíme v ruke pod 45° uhlom.

- Zatlačte tlačítko START/STOP a zapnite prístroj
- Zatlačte tlačítko TRYB PRACY nastavte **slabé vlny** povrchové čistenie alebo **silné vlny** hĺbkové čistenie (obrázok 1)



VTLÁČANIE / ULTRASONIC	
L ● ● ●	(L) NÍZKE VLNY
● ● H	(H) SILNÉ VLNY
KAVITAČNÝ PEELING / SKIN SCRUBBER	
L ● ●	(L) NÍZKE VLNY
● H	(H) SILNÉ VLNY

Obr. 1 rozsvietenie sa diód pri nastavení jednotlivých aplikáciách

Práca so špachtľou pri kavitačnom peelingu na prístroji.



Smer pohybu špachtou po pokožke tváre.



Výživa/Vtláčenie aktívnych látok do pokožky - sonoforéza

Hĺbkovo vyživuje a regeneruje pokožku - vtláča aktívne látky - ampulky do pokožky


- Redukuje vrásky
- Urýchľuje tvorbu kolagénu
- Stimuluje obnovu kožných buniek

Metodika aplikácie:

Aby ste docielili požadovaný efekt je nutné na pokožku naniest' hrubú vrstvu (2-3mm) Chladivého gélu ACTIV alebo Gél na aplikáciu **Dermo Lift/Peel SYIS** zmiešaného z ampulkami podľa toho aký efekt chcete doceliť.

- Zatlačte tlačítko START/STOP a zapnite prístroj
- Zatlačte tlačítko TRYB PRACY nastavte **slabé vlny** povrchové vtláčanie alebo **silné vlny** hĺbkové vtláčanie (obrázok 1)

Práca so špachtľou pri sonoforéze na prístroji vykonávame opačne ako pri kavytlačnom peelingu. Špachtla je otočená ako je to na obrázku nižšie.

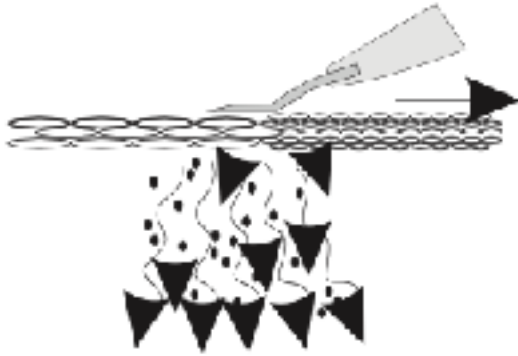

Po ukončení aplikácie sonoforézy procedúru ukončíme aplikovaním alginátovej masky na pokožku. Tú vyberáme podľa rohu na čo bola daná procedúra zameraná.

Použitá kozmetika počas procedúry:

Príprava pokožky na procedúru :

1. Na odlíčenie použijeme:

- **Mlieko SYIS** . Prípravok obsahuje olej z hroznových jadriec s upokojujúcimi účinkami.

Mlieko obsahuje močovinu, ktorá má silné zvláčňujúce účinky, poskytuje lepšiu absorpciu látky do kože,

- **Levandulový med pre čistenie SYIS** . Prípravok obsahuje hroznový olej a vitamín E rozpustný v tukoch. Tieto látky zastavujú proces starnutia pokožky, pôsobia protizápalovo a upokojujúco,

2. Vykonáme peeling:

- **Enzimatický píling SYIS** ktorým vykonáme masáž . Enzým bromelain napomáha štiepeniu bielkovín, získava sa z ananásu, obsahuje vitamín C, ktorý má kľúčovú úlohu pri odstraňovaní škvŕn.
- **Peeling korund s guľčkami jojoby a koloidným zlatom SYIS** ,posilňuje a vyhladzuje vrstvy kože. Výrobok obsahuje zmes ovocných extraktov: maliny , jahody , kivi , jablká , broskyne , papája s hydratačnými vlastnosťami. **Koloidné zlato** znižuje tvorbu vrások, urýchľuje prechod účinných zložiek do pokožky. **Korund** má vlastnosti zbrusovacie, stimuluje prirodzenú obnovu nových tkanív a kolagénu - bio syntéza. Zelené jojobové korálky pomáhajú odstrániť odumreté bunky .

3. Opláchnite zvyšky peelingu jednorázovými utierkami.

4. Pre tónovanie , použite :

- **Antibakteriálne Lotion SYIS**, obnovuje prirodzené pH pokožky. Tonik obsahuje kyselinu mliečnu s exfoliačným a antibakteriálnym pôsobením.
- **Minerálna voda tónizujúca SYIS**. Výrobok obsahuje **MultiminerálnyComplexII**, ktorý urýchľuje látkovú výmenu pokožky, takže koža je posilnená, pružná a mäkká.

5. Po očistení pokožky túto poriadne osušte a aplikáciu vykonávajte 20-25 min. podľa nasledujúceho obrázku.

- **Ampulka CollagenPure 100%** Kolagénové ampulky obsahujú rozpustený kolagén zadržávajúci vodu v pokožke.
- **Ampulky SYIS na pokožku s rozšírenými cievami**. Obsahujú výťažok z japonského plodu perelkovca. Ricínový olej zvlhčuje suchú pokožku a retinol obsiahnutý v ampulke a vitamín E zabraňuje tvorbe voľných radikálov. S cynamenovým olejom má ampulka antibakteriálny účinok .
- **Hydratačné a vyživujúce ampulky** Obsahuje hydrolyzovaný mliečny proteín , ako je prírodný NMF (prírodný faktor hydratačný) . Ampulky pôsobia liftingujúco.
- **Ampulky posilňujúce zmierňujúce pre cievy** sú ideálne pre pleť s rozšírenými cievkami a sklonom k podráždeniu. Výrobok obsahuje, okrem iného výťažok zo Sofory japonskej bohatý na rutín posilňujúcu krvné cievy. Ampulky posilňuje a chráni pleť s rozšírenými cievkami a suchu, obnovuje poškodený hydrolipidný plášť kože a reguluje transepidermálnu stratu vody (TEWL).
- **Bieliaca ampulka s vit. C** výrobok obsahuje aktívny derivát vitamínu C, ktoré inhibuje tvorbu škvŕn a zosvetľuje už existujúce.
- **Ampulky liftingujúce TripeptidViperSerum s jedom zmiije** Liftujúce ampulky obsahujúce 4% roztoku syntetickej substancie boli vytvorené na základe bielkovín v jede zmiije. SYN® - AKE pôsobí proti vráskam uvoľnením svalstva a fibroblastov.

6. Na pokožku aplikujeme **Alginátovú masku na kožu SYIS** v kombinácii s **Aktivátorom masky SYIS** .

Dostupné typy masiek alginátových SYIS :

- Alginátová maska Botoksová Hibiscus PeelOff 30g ,
- Alginátová maska 300ml exotic ,
- Alginátová maska 300ml kaviár ,
- Alginátová maska upokojujúca - Relaxačná 300 ml ,
- Alginátová liftingujúca maska 300 ml ,
- Alginátová maska 300ml Mocca ,
- Alginátová maska 300ml New Look ,

- Alginátová čistiaca 300 ml ,
- Alginátová maska Čistiaci peeling z morského bahna Off 30g ,
- Alginátová maska 300 ml anti - akné ,
- Alginátová maska s kaviárom (PeelOff) 30 g
- Alginátová rozjasňujúca maska s výt'ážkami z Mulberry 30 g ,
- Transparentné zlato maska (PeelOff) 50 g
- Alginátová maska 300ml Vitamín bomba ,
- Alginátová Maska s arganového oleja (PeelOffShaker) 25 g
- Hydratačná maska - regenerujúca 250ml
- Maska s'ahujúca - zmatňujúca 250 ml

7. Aplikujeme **SYIS očný krém**. Kombinácia kyseliny mliečnej a oxidu zinočnatého poskytuje rýchly spevňujúci účinok. Vďaka prítomnosti oxidu zinočnatého krém dokonale odstraňuje známky únavy, opuchy a kruhy okolo očí , zlepšuje mikrocirkuláciu .

8. Na konci aplikácie použijeme

- **Krém pre pokožku s rozšírenými cievkami**. Obsahuje vitamín E , mandľový olej pre hydratáciu, panthenol s ukl'udňujúcimi vlastnosťami.
- **Tripeptydvipercream 30ml s jedom zmiže** Denný a nočný krém proti vráskam obsahuje syntetické proteíny, ktoré prirodzene vyskytujú v jede zmiže druhu *Tropidolaemuswagleri*. Tento proteín paralyzuje vzruch z nervových buniek na svalové bunky a fibroblasty, tým, že zníži kontraktilitu buniek. To zase spôsobuje skrátenie existujúcich vrások a zabraňuje vzniku nových, pretože sa znižuje schopnosť hnietenia kože do podoby vrások. Okrem toho, krém obsahuje kyselinu hyalúronovú, ktorá udržiava primeranú úroveň hydratácie pokožky!!
- **HelixExtract krém s výt'ážkom zo slimákov 30 ml** Denný a nočný krém o pôsobení:-
 Výživnom - Hydratačnom - Proti vráskam
 - Regeneračnom - Ochrannom - Stimulujúcim fibroblasty k produkcii kolagénu
 Krémy pre ľudí v každom veku, ktorí majú problémy, ako:
 - Jazvy po akné - Vrásky - Strie - Nadmerná produkcia mazu
 - Microcomedones

BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY:

1. Stroj je profesionálne zariadenie pre použitie v kozmetických salónoch . Používať ho môže kvalifikovaný personál , aby sa zabránilo nežiadúcim účinkom počas liečby .
2. Nerozoberajte prístroj a nepokúšajte sa používať na iné účely , než je uvedené v tejto príručke. Servis a opravy musí vykonať servis v spoločnosti ACTIV .
3. Neinštalujte alebo neprevádzkujte prístroj v blízkosti vlhkých zariadení alebo mokrými rukami tak, aby žiadna tekutina nevošla do prístroja.

4. Prosím, odpojte ho od napájania a obráťte sa na servisné stredisko na ACTIV v nasledujúcich prípadoch :
 - kvapalina sa dostala dovnútra prístroja ,
 - Prístroj vydáva zvláštny zápach, dym alebo podivné zvuky ,
 - napájací kábel je poškodený ,
 - zariadenie vám spadlo alebo má poškodený kryt .
5. Z bezpečnostných dôvodov odpojte napájací kábel zo zásuvky po použití prístroja .
6. Nevkladajte nič do otvoru v zariadení. Ak cudzí predmet spadne do diery , vyberte kábel zo zásuvky a obráťte sa na predajcu alebo výrobcu .
7. Neumiestňujte prístroj na nestabilný vozík , stojan alebo vozidlo .
8. Napájanie musí byť v súlade s údajmi na typovom štítku. Inak je tu riziko nesprávnej činnosti.

Poznámka:

V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných udalostí, obráťte sa na služby v ACTIV – vyhnete sa tak nebezpečenstvu.

Toto zariadenie nie je určené na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti ani vedomosti, pokiaľ im neboli poskytnuté inštrukcie o použití tohto zariadenia.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Prístroj je vyrobený z materiálov, ktoré môžu byť využité alebo recyklované .

PODMIENKY REKLAMÁCIE

Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

Pred vrátením prístroja do servisu kontaktujte servisné miesto kde predložíte platný záručný list.

Záručný list musí byť vyplnený presne má obsahovať pečiatku a podpis predajného miesta, Záruka je neplatná, v prípade akýchkoľvek zmien na výrobku .

Dezinfekcia

Kavitačnú špachtlu dezinfikujte kozmetickým tampónom navlhčenom v preparáte na dezinfekciu **AHD**.

Technické údaje:

- Kavitačný peeling: 25 kHz
- Ultrazvuk: 2 MHz
- Napájanie AC 100-240V, 50 x 60Hz

- Výkon 5,5V/500 mA
- Batéria 3,7V 850 mA
- Max. výkon 1,5W +/- 10%

UPOZORNENIE

Balenie nevyhadzujte!!!! Bez balenia Vám nebudeme mohli uznať reklamáciu

Predávajúci nenesie zodpovednosť po problémoch spojených s poškodením pokožky zákazníka v prípade, že prístroj nebol používaný v súlade s návodom na jeho obsluhu.

PRED PROCEDÚROV JE NUTNÉ DAŤ DOLE S TELA VŠETKY KOVOVÉ PREDMETY (NÁUŠNICE, PIERCING a pod.)

