

NÁVOD NA ULTRAZVUKOVÚ ČISTIČKU ACD-4830



Ultrazvuková čistička CDS-100 slúži na dezinfekciu kozmetických doplnkov, najmä hlavíc z mikrodermabrazie, fréz, zubných a kozmetických nástrojov. Okrem veľmi vysokej účinnosti čistenia aj na tých najneprístupnejších miestach, ultrazvukové čistenie nespôsobuje žiadne mechanické poškodenie čistených predmetov. Táto čistička má displej a jej obal je vyrobený z vysoko kvalitného plastu.

Technické údaje

Materiál: **SUS304 nehrdzavejúca oceľ**


- Nastavenie času: **1-30 min.**
- **Vysokokvalitný konvertor**
- Napätie: **AC220~240V, 50Hz**
- Citlivosť: **35 kHz**
- Výkon ultrazvuku: **150W**
- Objem: **3L**
- Rozmery: **385x234x193(L×W×H)**
- Váha: **3,6 kg**

* Ďakujeme vám za zakúpenie tohto produktu.

* Pre správne a bezpečné používanie si pozorne prečítajte tento návod.

* Uschovajte pokyny

- * Pred naplnením zariadenie odpojte. Neprekračujte riadok „MAX“, aby * nedošlo k preplneniu.
- * Nenapĺňajte nádrž žieravinami alebo chemikáliami. Môže to spôsobiť únik a poškodenie.
- * Nepoužívajte zariadenie , ak je poškodený kábel alebo zástrčka. V prípade poškodenia sa obráťte na servisné stredisko so žiadosťou o kontrolu a opravu.
- * Umývačku uložte na bezpečné miesto.
- * Zariadenie by nikdy nemala zostať bez dozoru po pripojení.
- * Nepoužívajte pri kúpaní.
- * Ihneď po použití zariadenie odpojte
- * Neponárajte čističku do vody, aby nedošlo k úrazu elektrickým prúdom
- * Nalejte vodu cez odtok vody, nikdy vodu nevyprázdňujte naklonením zariadenia.

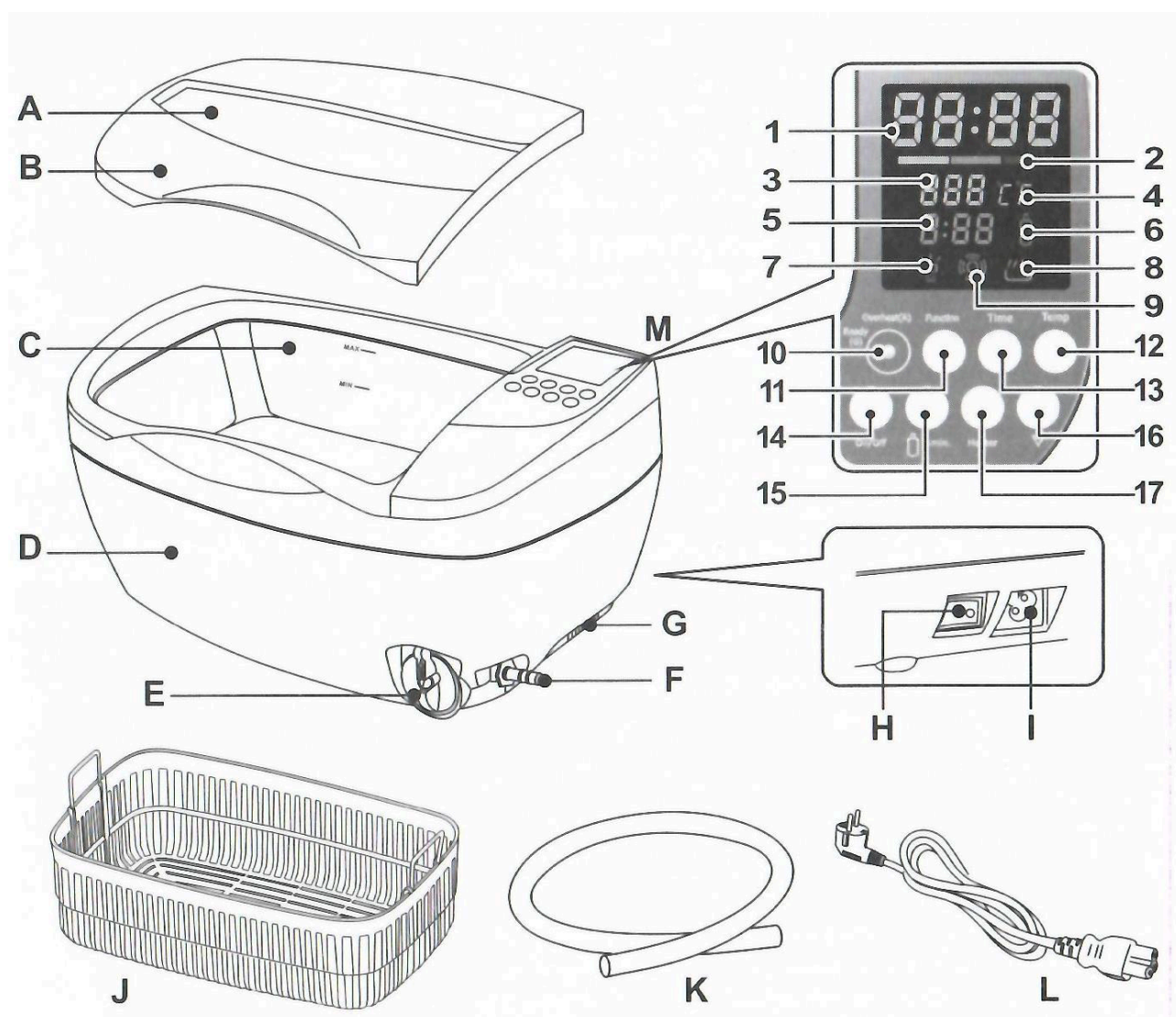

A - okienko	F - napúšťací ventil	J - Plastový kôš
B - víko hadica	G - ventilácia	K - Vypúšťacia
C - nádržka	H - vypínanie/ zapínanie	L - Napájací kábel
D - tela prístroja	I - Zásuvka napájacieho kábla	M - Ovládací panel
E - odtok - výpust kvapaliny		

Ovládací panel a funkcie:

1. Zobrazenie času. Čas sa počíta, keď zariadenie začne pracovať.
2. Ukazovateľ teploty
 - Zelené svetlo znamená dosiahnutie 0 - 30% nastavenej teploty
 - Oranžové svetlo znamená dosiahnutie 30-60% nastavenej teploty
 - Červené svetlo znamená dosiahnutie 60-90% nastavenej teploty
 - Blikajúce červené svetlo znamená, že kvapalina je blízko k dosiahnutiu 60 - 90% nastavenej teploty
 - Všetky rozsvietené kontrolky znamenajú, že bola dosiahnutá nastavená teplota vody
3. Zobrazenie nastavenej teploty. Stlačením tohto tlačidla nastavíte jednu z 5 teplôt: 40 ° C - 45 ° C - 50 ° C - 55 ° C - 55 ° C - 60 ° C - 140 ° F
4. ° C ° F - označuje jednotku teploty
5. Pracovný čas. Pracovný čas vypočítaný v hodinách
6. Riadenie pracovného času. Keď čas behu roztoku klesne na nulu, kontrolka začne blikáť, čo naznačuje zmenu kvapaliny.
7. Indikátor funkcie odplynienia.
Svieti - zvolená funkcia
Kontrolka bliká, počas prevádzky
8. Indikátor funkcie predhrievania. Svetlo indikuje, že je funkcia aktivovaná
9. Indikátor funkcie prania. Zapnuté znamená, že umývačka pracuje v normálnom prevádzkovom režime
10. Indikátor činnosti prístroja :
Zelená - čistička pripravená na použitie
Aktivovaná ochrana proti prehriatiu. Počkajte, kým sa indikátor nerozsvieti na zeleno (20 minút alebo dlhšie)
11. Tlačidlo aktivujúce funkciu odplynienia. Stlačením vyberiete funkcie odplynienia. Stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť (trvanie - 2 minúty).

Odplynenie. V niektorých prípadoch sa môžu v pracom roztoku objaviť vzduchové (plynové) bubliny - kvôli chemickým reakciám.

Plynné bubliny bránia normálnej činnosti čističky. Zapnutie odplynovacej funkcie pomáha odstraňovať plynové bubliny, a tým zlepšuje účinnosť umývačky.

12. Tlačidlo zmeny teploty. Stlačením tlačidla zmeníte nastavenú teplotu na požadovanú teplotu.
13. Tlačidlo zmeny času. Stlačením tlačidla nastavíte požadovaný čas. Každé stlačenie zmení čas o 5 minút.
14. Tlačidlo zapnutia / vypnutia Po zapnutí prístroja pomocou tlačidla H (obrázok) je čistička pripravená na prácu. Stlačením tlačidla zapnúť / vypnúť spustíte / zastavíte činnosť zariadenia. Keď čas dosiahne 0:00, čistička sa automaticky vypne.
15. Ovládacie tlačidlo času. Po každom stlačení tlačidla sa čas zvýši o 20 minút. Napr. 1:20 znamená 1 hodinu a 20 minút. Maximálny možný čas nastavenia je 9 hodín 60 minút.
16. Tlačidlo na zníženie času / teploty
 - Pri nastavovaní prevádzkového času (funkcia 13) - stlačením sa čas skráti o 1 minútu
 - Pri nastavovaní teploty (funkcia 12) - stlačením znížite teplotu o 1 stupeň
 - Keď nastavíte pracovný čas riešenia (funkcia 15) - stlačením skrátime čas o 20 minút
17. Tlačidlo štart zahrievania. Stlačením aktivujete funkciu zahrievania. Opätovným stlačením deaktivujete funkciu ohrevu. Ohrievanie sa automaticky vypne, keď čas čistenia dosiahne 0:00.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

1. Zariadenie je profesionálnym vybavením pre použitie v kozmetických salónoch. Prevádzka zariadenia iba kvalifikovaným kozmetickým personálom sa počas procedúry vyhyba nepriaznivým účinkom.
2. Zariadenie nerozoberajte ani sa ho nepokúšajte používať na iné účely, ako sú uvedené v tomto návode na obsluhu. Všetky servisné a opravárske práce smie vykonávať iba autorizovaný servisný pracovník (ACTIV Tomasz Pacholczyk).
3. Neinštalujte ani neobsluhujte zariadenie v blízkosti tekutín, mokrých miest alebo mokrých rúk - aby sa do prístroja nedostali žiadne tekutiny.
4. Ihneď odpojte sieťovú zástrčku a kontaktujte autorizovaný servis ACTIV Tomasz Pacholczyk v nasledujúcich prípadoch:
 - a) do zariadenia vnikla tekutina, b) zariadenie vydáva zvláštny zápach, dym alebo vydáva zvláštne zvuky, c) bol poškodený napájací kábel, d) zariadenie bolo prevrátené alebo bol poškodený kryt.
5. Na káble nekladte žiadne predmety. Neinštalujte zariadenie tam, kde by ľudia mohli šliapať na napájací kábel.
6. Z bezpečnostných dôvodov po každom použití odpojte napájací kábel zo sieťovej zásuvky.

7. Nevkladajte nič do otvoru v zariadení. V prípade, že do otvoru vnikne cudzí predmet, odpojte kábel zo zásuvky a kontaktujte distribútora alebo výrobcu.
8. Neumiestňujte zariadenie na nestabilný vozík, poličku alebo vozidlo. Ak zariadenie spadne, môže sa poškodiť.
9. Na zaručenie nastavenej doby použiteľnosti zariadenia sa odporúča pred ďalším stlačením vypínača (medzi zapnutím a vypnutím a naopak) dodržať interval jednej minúty.
10. Napájací zdroj musí vyhovovať špecifikáciám na typovom štítku. V opačnom prípade hrozí riziko poruchy zariadenia, poškodenie alebo dokonca popálenie.

POZOR:

1. V prípade poškodenia napájacieho kábla alebo iných porúch sa obráťte na autorizované servisné stredisko, aby ste predišli nebezpečenstvu.
2. Toto zariadenie môžu používať deti vo veku najmenej 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými a duševnými schopnosťami a osoby, ktoré nemajú skúsenosti a znalosti vybavenia, ak je zabezpečený dohľad alebo poučenie o bezpečnom používaní zariadenia tak, aby s tým boli hrozby pochopiteľné.
3. Prístroj nie je určený na hranie pre deti. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením.
4. Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak sú v jeho blízkosti deti alebo osoby, ktoré nemajú dostatočné znalosti o používaní prístroja.
5. Toto elektrické zariadenie nie je hračka. Nesprávne použitie alebo kontakt s elektrickým zariadením môže predstavovať riziko zranenia alebo smrti, a preto by sa mal používať a skladovať mimo dosahu detí.

LIKVIDÁCIA ZARIADENIA

Použité elektrické zariadenia, prístroje a obaly by sa mali posielť do recyklačných stredísk v súlade so zásadami ochrany životného prostredia. Elektrické zariadenia sa nesmú likvidovať s domovým odpadom. Postupujte podľa pravidiel likvidácie tohto typu zariadenia. S cieľom chrániť prírodné prostredie v súlade so smernicou 2012/19 / ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení by sa odpady z elektrických zariadení mali zbierať osobitne a potom preniesť na zberné miesto odpadov z elektronických a elektrických zariadení.

Na konci svojej životnosti, ako aj staré zariadenia obsahujú recyklovateľné súčasti s plnou hodnotou, preto by sa mali odosielať na recykláciu.

